

# Auto-Examen Anal

## Instrucciones de Coleccion

1

Contenedor De Etiquetas



(nombre, fecha de nacimiento, día & hora del espécimen)

2

Quita la tapa blanca y tirala en el contenedor de basura



3 Tome la tapa azul e inserte el algodón en el recto de 1-1.5 pulgadas (girelo suavemente)



4

Asegúrese que la punta del algodón este café!



(si la punta no esta café, agarre otro y empiece desde el paso número 1)

5

Inserte el algodón en el tubo




(Asegúrese que la punta del algodón tope en el gel que esta abajo en el tubo)

Cerrar la tapa azul que esta adherida al tubo blanco con el algodón empujando firmemente hacia abajo

6

Lava tus manos

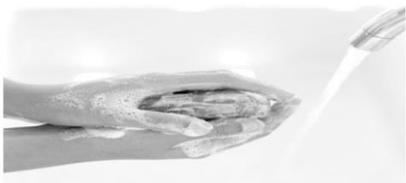

7

Regrese el tubo cerrado a la persona designada



shutterstock - 191557223